

Access-Ability

- fournisseur d'accessibilité -

Ceinture thoracique maintien postural

La **ceinture thoracique pour maintien postural** en voiture est un **produit de qualité, fabriqué en France en tissu néoprène résistant et confortable**.



Elle est **ergonomique** et s'adapte à la corpulence de la personne. Cette ceinture aide à maintenir une position bien droite dans le siège de voiture. Cette position est nécessaire pour une utilisation correcte de la ceinture de sécurité dans le véhicule.

Caractéristiques

- **Design ergonomique** réglable en hauteur et largeur en fonction de la personne
- **Fabriqué en France en tissu néoprène** résistant et confortable
- **Universel**: facile à installer, il s'adapte à tout type de siège avant ou arrière à condition qu'il ait un espace entre l'assise et le dossier du siège.
- **Léger** : facile à prendre en voyage

Législation et sécurité

- L'utilisation de la **ceinture de sécurité** reste **obligatoire** lorsque vous utilisez la ceinture thoracique.
- L'utilisation de la ceinture thoracique **engage votre propre responsabilité**.

Installation

1. Glisser la ceinture thoracique (B) sur la **base support** (A). Placer l'ensemble (A+B) sur le dossier du siège de la voiture en faisant le tour dossier. Si nécessaire, plier le siège vers l'avant pour passer les sangles et les accrocher.
2. **Serrer** au maximum les sangles autour du dossier du siège .
3. *Installez la personne et ajustez la ceinture à sa taille et sa corpulence.*



Ceinture thoracique (B)



Base support siège (A)

Ceinture thoracique

ACCESS ABILITY

Adresse : 10 Bis Rue du 11 novembre

80270 Airaines, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu; www.access-ability.eu

